

Guía

de Uso de la Biblioteca
Multiscanbody New Ancorvis

exocad

3shape

dental wings
A Straumann Group Brand



BIBLIOTECAS MULTI SCANBODY

Las bibliotecas multiscanbody de New Ancorvis integran las bibliotecas de scanbody originales dentro de las bibliotecas propietarias de New Ancorvis, incluyendo también aquellas desarrolladas para los marker de New Ancorvis.

Las bibliotecas están disponibles para los principales sistemas de implantes en el mercado y para los fabricantes de componentes compatibles, incluyendo Medentika, Dess, Elos y Arum.



Las bibliotecas CAD también incluyen:



ARUM



ELOS



DESS



MEDENTIKA
A Straumann Group Brand


Y más
próximamente...



NEW

- Scanbodies **Originales**
- Scanbodies **New Ancorvis**
- Scanbodies de fabricantes de **Compatibles**

Familia de Scanbody

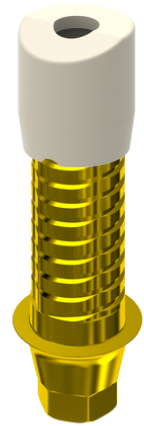

SCAN MARKER V4

Montar el V4 Scan Marker con la Base V4 para obtener tu Scan Body. Para flujo sin modelo, recomendado hasta un máximo de 2 implantes (para trabajos más grandes, usar Scan Body AQ).

Material: PEEK
Flujo: Digital
REF: SAT01



SCANBODY AQ Detección de Posición del Implante

Material: Ti Gr5
Flujo: Digital/Analógico



ONE SHOT

One Shot es el scanbody desarrollado para finalizar Full Arch y restauraciones múltiples sobre implantes. Gracias a su geometría y tamaño reducido, facilita todas las fases de escaneo con escáneres intraorales.

Material: Ti Gr5
Flujo: Digital



SCAN REPLY

Scan Reply es un componente desarrollado para finalizar Full Arch y restauraciones múltiples sobre implantes, con flujo digital o analógico. Es útil para transferir las posiciones de los implantes desde un provisional/test/prototipo o impresión

Material: Ti Gr5
Flujo: Digital

Bibliotecas de New Ancorvis

NewAncorvis_Direct

Técnica **Atornillada Directa** para estructuras de metal y zirconia




NA_MBase Tech

Elementos unitarios atornillados de **producción híbrida**



NewAncorvis_Ti Base

Incluye todas las bibliotecas para la técnica de cementado (**V4 Base y Link-in**)

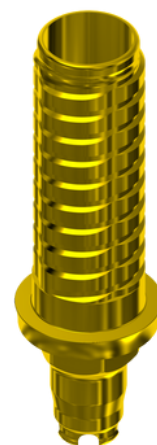

NewAncorvis_INNOVA

Bibliotecas dedicadas al sistema **INNOVA**, diseñadas para permitir el atornillado directo del **Ti-Base V4** a la estructura



Direct

Bibliotecas dedicadas a la técnica de atornillado directo



Metal No Rot: Conexiones anti-rotacionales para elementos individuales



Metal No Rot (FAS): Conexiones anti-rotacionales para elementos individuales, agujero angulado




Metal Rot: Conexiones rotacionales para puentes y barras sobre implantes



Metal Rot (FAS): Conexiones rotacionales puentes y barras sobre implantes, agujero angulado



Zirk No Rot (Sly System): Para estructuras de técnica atornillada directa en zirconia. En las conexiones internas aplicamos el componente Sly System para insertar entre la conexión y el implante.

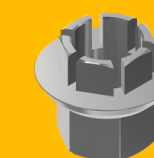

Sly System

Direct

Visualización CAD



	exocad	3shape	dental wings A Straumann Group Brand
Nombre de la biblioteca CAD	NewAncorvis_Direct	NA_Direct	NA_Direct
Visualización CAD	Posizione dell'impianto Dente 15 Seleziona impianti NewAncorvis - AQ Direct Thommen ø4.0 Connessior Informazioni su questa Metal No Rot Metal No Rot (FAS) Zirk No Rot (Sly System) Metal Rot Metal Rot (FAS)  Pinchar para más detalles	Abutment NA_Metal Category NA Direct System thomm NO ROT Thommen SPI ROT Thommen SPI Bridge	NA Direct - Thommen SPI 3.5 Metal No Rot 3.5 Metal Rot 3.5 Metal Rot (FAS) 3.5 Zirk No Rot (Sly System) 4.0 Metal No Rot 4.0 Metal No Rot (FAS) 4.0 Metal Rot 4.0 Metal Rot (FAS) 4.0 Zirk No Rot (Sly System) 4.5 Metal No Rot 4.5 Metal No Rot (FAS) 4.5 Metal Rot

Direct_Premilled




Visualización CAD



Producción IN-HOUSE

Librerías que hacen autónoma la fresadora del Premilled en el laboratorio. Disponibles para Millbox e Hyperdent

[Descargar Catálogo](#)

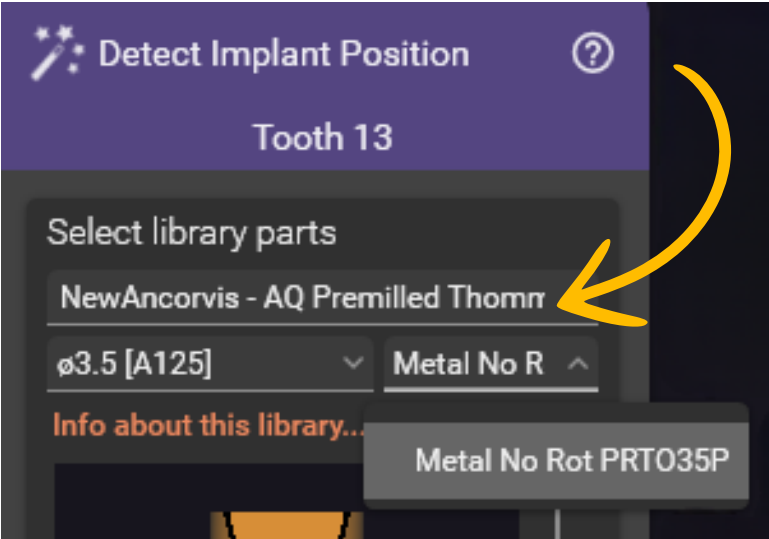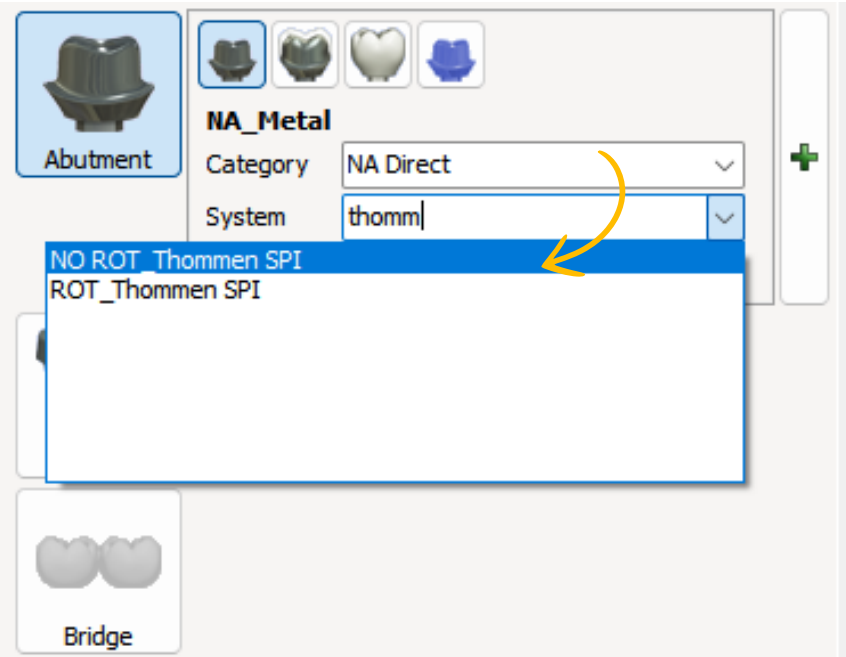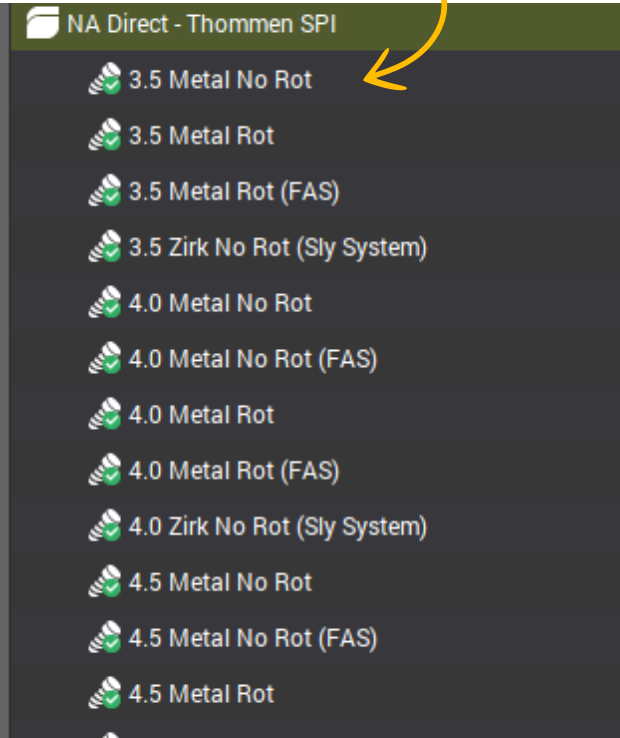	exocad	3shape	dental wings A Straumann Group Brand
Nombre de la biblioteca CAD	NewAncorvis_Premilled	NA_Direct	NA_Direct
Visualización CAD	 		

MBase Tech

Bibliotecas dedicadas a la producción híbrida de elementos individuales




Titanio o Cromo Cobalto
por **fusión láser**

Conexión
pre-fresada

Al seleccionar la biblioteca MBase Tech, para garantizar una producción regular, verifica que tu modelado esté **dentro de los límites morfológicos mostrados**.

Nota: Antes de exportar el archivo, asegúrate de que esté orientado en el eje y plano

OLD

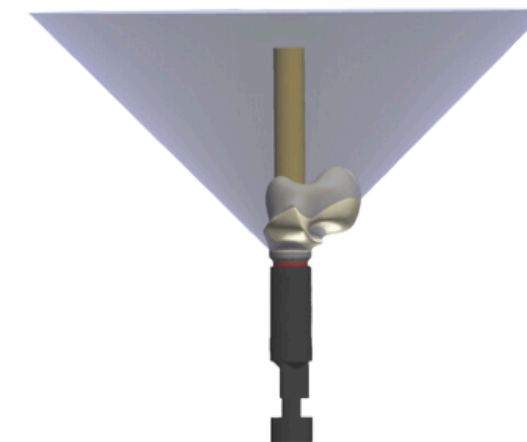



NEW



MBase Tech

Visualización CAD

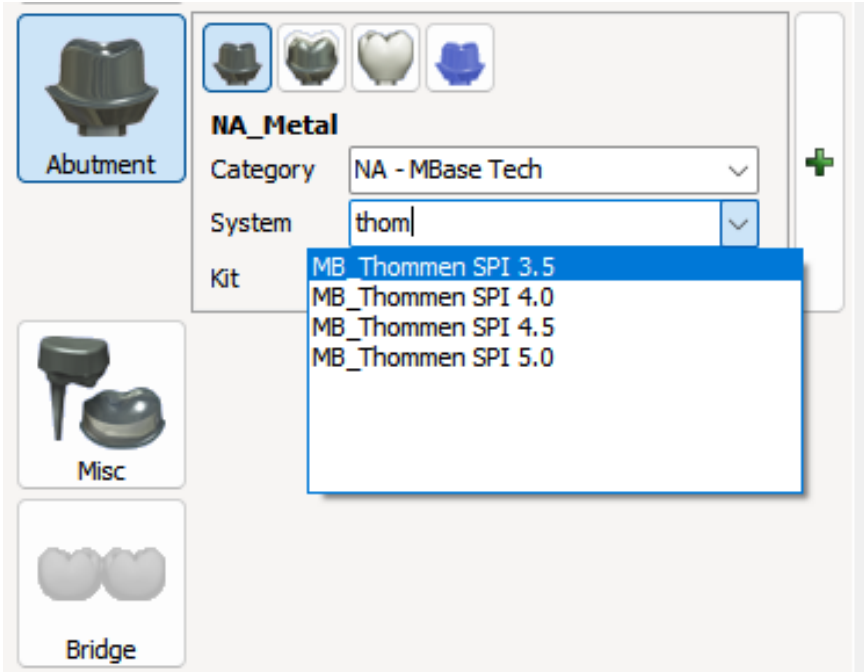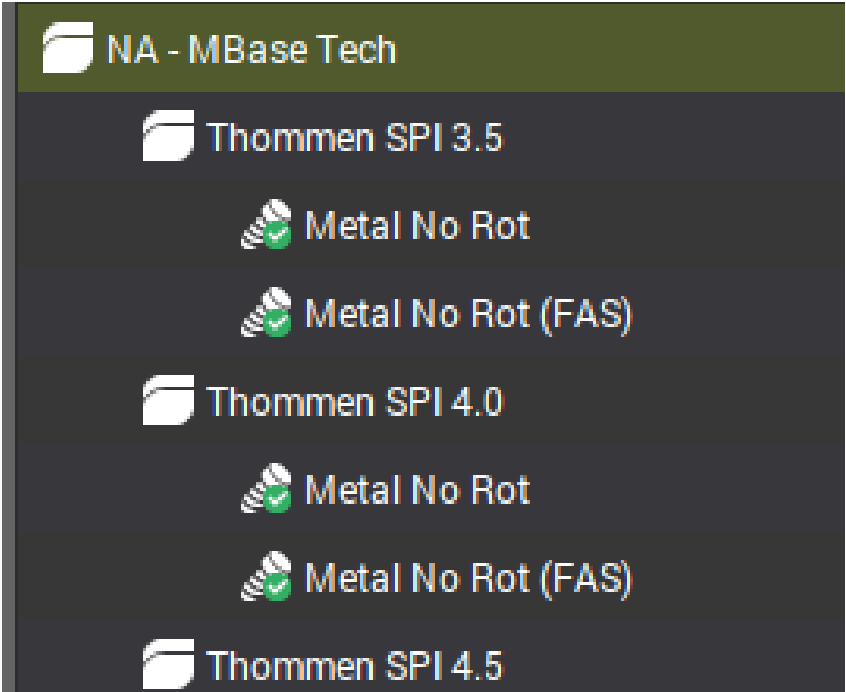


	exocad	3shape	dental wings A Straumann Group Brand
Nombre de la biblioteca CAD	NA_MBase	NA_MBase	NA_MBase
Visualización CAD			

Ti Base

Bibliotecas dedicadas a la técnica cementada sobre Ti Base

- **HC** en Ti Base V4 indica la altura gingival del componente
- **HC** indica la altura de la cánula Ti Base V4 y Link-In
- Las alturas de la cánula son inclinables a partir de 7 mm, específicamente:
h 7-6-5 mm inclinación máxima 15°
h 4-3 mm inclinación máxima 20°

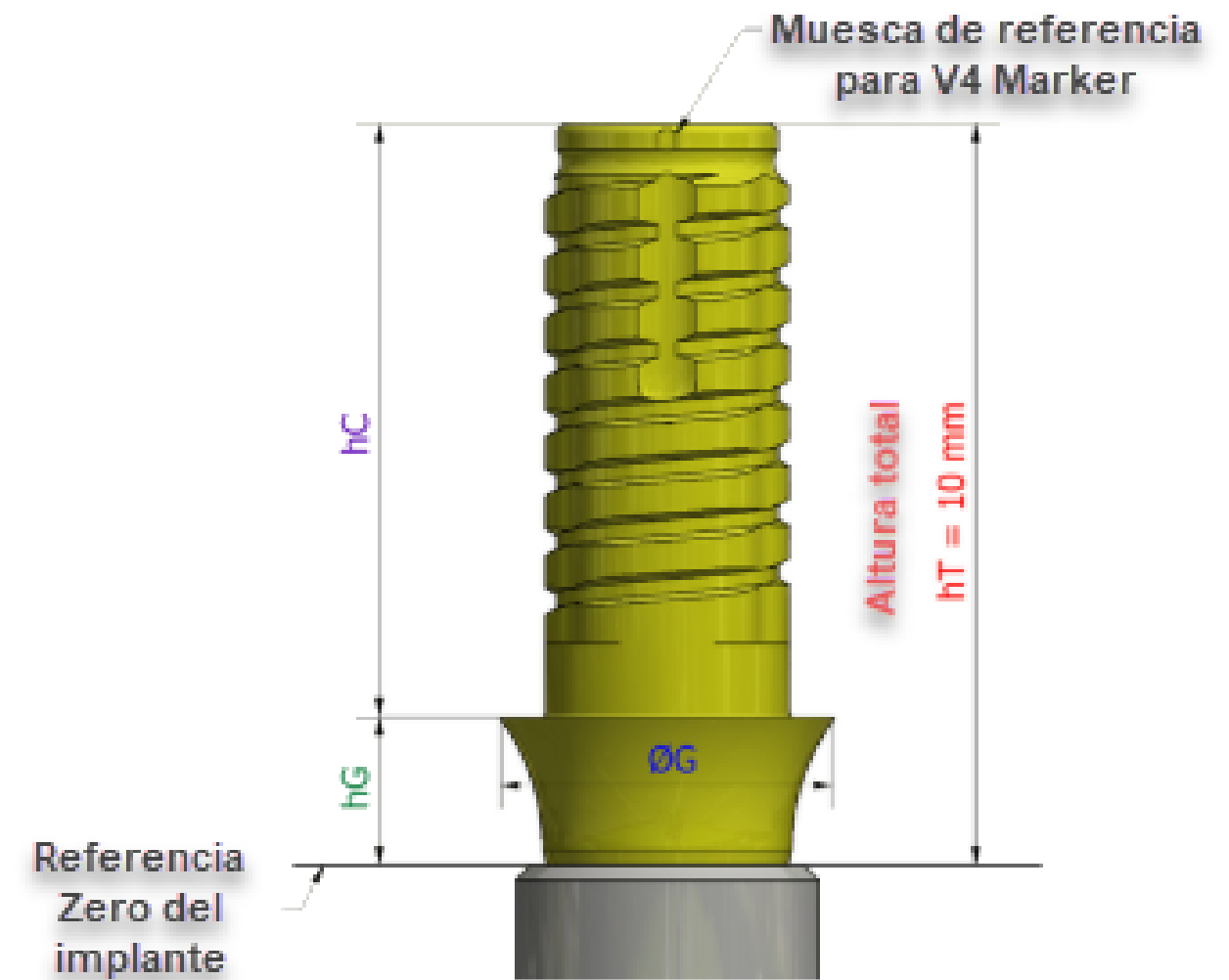


Sedes V4 Base & LINK-IN

Standard: Mayor tolerancia entre el componente y la estructura (estructuras sin desalineamientos o elementos individuales).

Small: Mejora el encaje entre la estructura y Ti-base (elementos individuales).

Large: Alto encaje con sede totalmente rotativa (solo para implantes fuertemente desalineados).

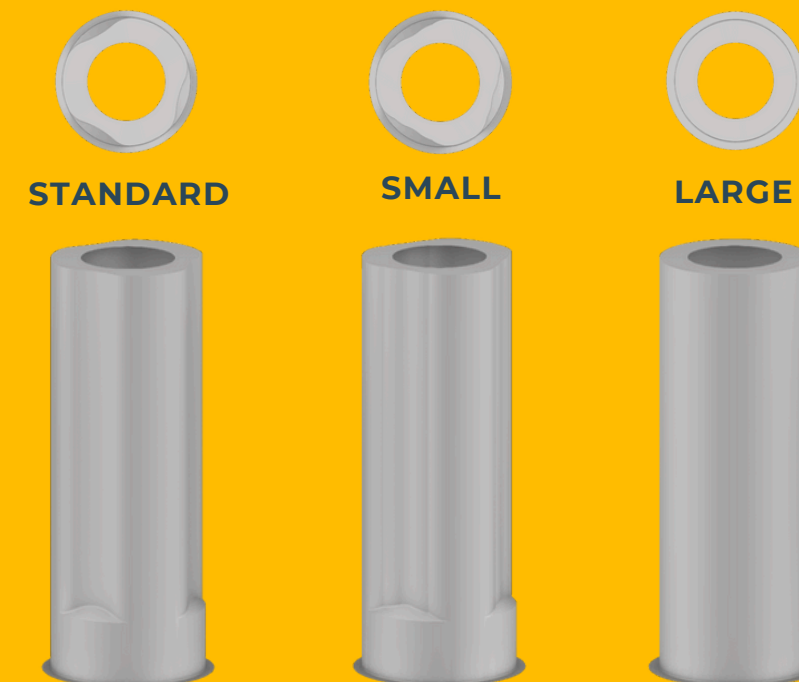

Ti Base

Visualización CAD




	exocad	3shape	dental wings A Straumann Group Brand
Nombre de la biblioteca CAD	NewAncorvis_TiBase	NA_Ti Base	NA_Ti Base
Visualización CAD			

Innova

Bibliotecas dedicadas a la técnica Innova

➤ Pensado y desarrollado para la **Producción en laboratorio** (bibliotecas CAD, estrategia CAM, fresas dedicadas y protocolos de uso):

- Pmma-Zr Fresado
- Impresión prototipada para prueba estética

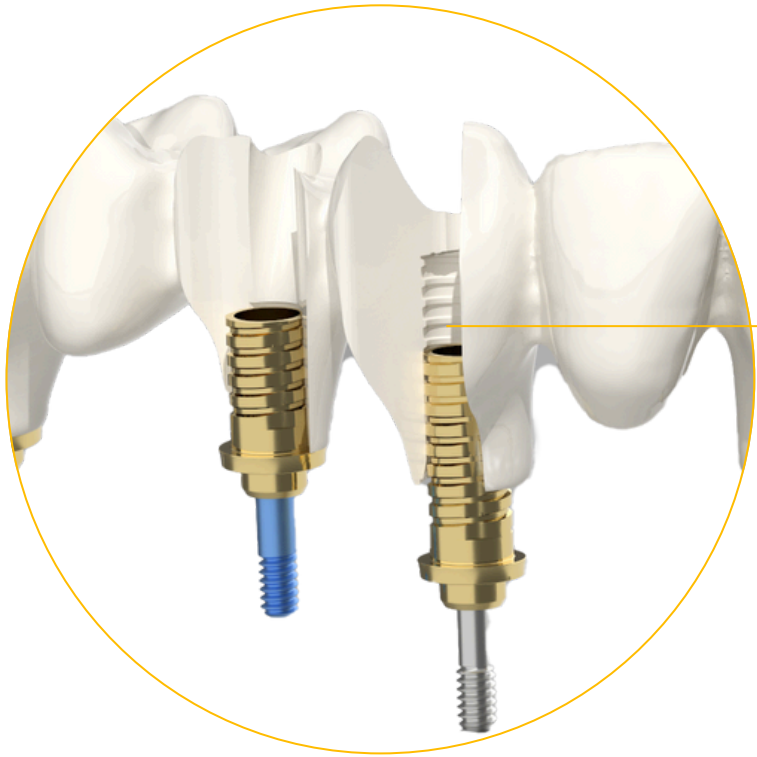


El Ti-base que se atornilla directamente en la estructura

INNOVA In-House



Máquinas para Fresado Abiertas

iCam	150i, 250i, 350i, 450i, 650
DG SHAPE - Roland	DWX-50, DWX-52D, DWX-52DCi, DWX-53D
DOF	SHARP2 PLUS, Craft 5X
Amann Girrbach	Ceramill motion 
Dental Machine	A5, A6, C5, C5 plus, G5
Dyamach	AS1, DT2, DT5, FM2, FZ2

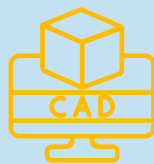


Software CAM

Millbox	Licencia actualizada a 2021
HyperDent	Versión mínima 9.2
Dentalcam	iCam



Innova CAM

Plug-in	Limitado al fresado solo de estructuras Innova
Accesorios	Incluye: 01 fresa para el fresado de Zirconia 01 fresa para el fresado de PMMA
V4 Starter kit	10 V4 Ti-base 01 Accesorio Pilot, útil para el apriete del V4 Ti-base

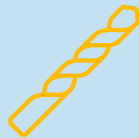





Herramientas Innova

Frese Zirconia	Disponibles con vástago de 3mm, 4mm y 6mm
Frese PMMA	Disponibles con vástago de 3mm, 4mm y 6mm
Frese Sintron AG	Disponibles con vástago de 3mm, 4mm y 6mm
V4 Clean Tool	Herramienta para la limpieza de la rosca de los residuos metálicos
Pilot	Mango para atornillar y desatornillar la V4 Base en el análogo

Innova

Visualización CAD

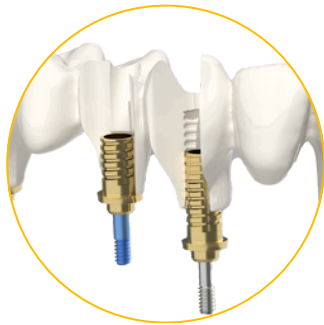

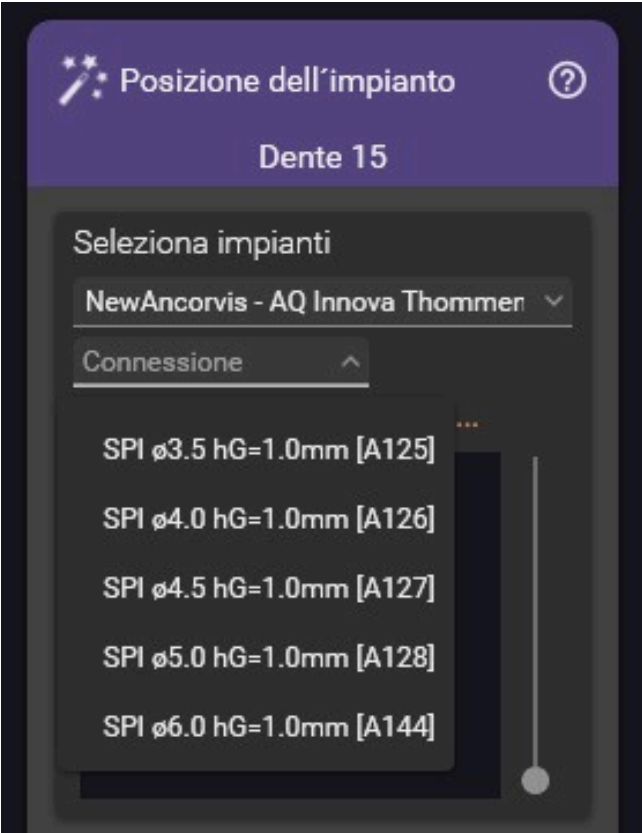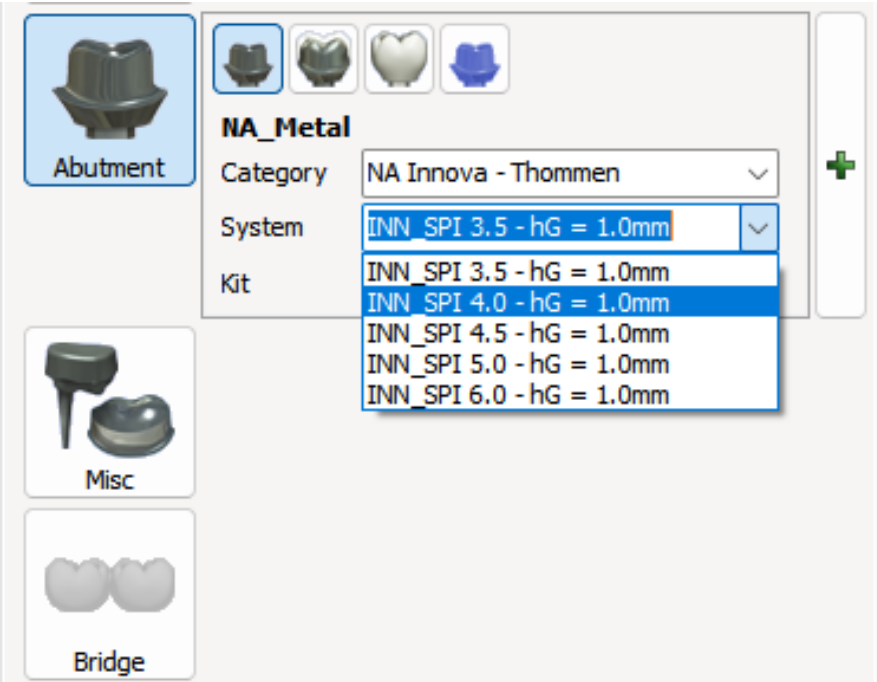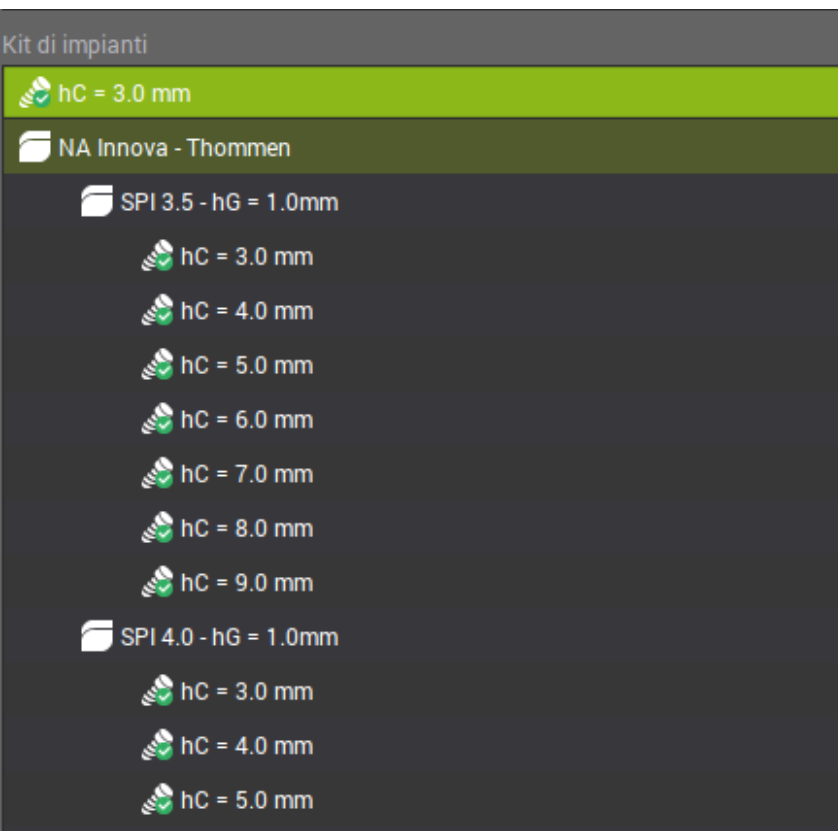	exocad	3shape	dental wings A Straumann Group Brand
Nombre de la biblioteca CAD	NewAncorvis_Innova	NA_Innova	NA_Innova
Visualización CAD	 Posizione dell'impianto Dente 15 Seleziona impianti NewAncorvis - AQ Innova Thommen Connessione - SPI ø3.5 hG=1.0mm [A125] - SPI ø4.0 hG=1.0mm [A126] - SPI ø4.5 hG=1.0mm [A127] - SPI ø5.0 hG=1.0mm [A128] - SPI ø6.0 hG=1.0mm [A144]	 Abutment Misc Bridge NA_Metal Category: NA Innova - Thommen System: INN_SPI 3.5 - hG = 1.0mm Kit: - INN_SPI 3.5 - hG = 1.0mm - INN_SPI 4.0 - hG = 1.0mm - INN_SPI 4.5 - hG = 1.0mm - INN_SPI 5.0 - hG = 1.0mm - INN_SPI 6.0 - hG = 1.0mm	 Kit di impianti hC = 3.0 mm NA Innova - Thommen - SPI 3.5 - hG = 1.0mm - hC = 3.0 mm - hC = 4.0 mm - hC = 5.0 mm - hC = 6.0 mm - hC = 7.0 mm - hC = 8.0 mm - hC = 9.0 mm - SPI 4.0 - hG = 1.0mm - hC = 3.0 mm - hC = 4.0 mm - hC = 5.0 mm

GUÍA DE BIBLIOTECAS PARA IMPLANTES

Procedimiento en 5 pasos

1

Recibe el escaneado intraoral o realiza una escaneo con el escáner de laboratorio

2

Tabla Implant System

- Verificar la disponibilidad de la conexión de implantes
- Verificar el tipo de solución disponible: Atornillada, cementada y tipo de material

3

Scanbody

Si utilizas un scanbody New Ancorvis, puedes diseñar con nuestras bibliotecas en cad

Si utilizas un Scanbody original, verifica si ya está disponible en la biblioteca; en caso contrario, es necesario convertirlo utilizando el software gratuito Passepartout

4

Configurador

Encontrar el código correcto para seleccionar en tu software en la fase de diseño CAD

5

Diseño en Software CAD

- Buscar el código encontrado gracias a el "Configurador"
- Al final del proyecto, abrir el archivo config para verificar la biblioteca usada

Implant System

Aquí encontrarás las conexiones implantarias en **orden alfabético** y, para cada una de ellas, el correspondiente **código de Scan Abutment**, el tipo de solución protésica disponible (Si el código está resaltado en verde en el software CAD, se indicará el nombre del implante. Si el código está resaltado en amarillo, el código de la librería estará disponible dentro de la carpeta **GENERIC**) y, finalmente, la disponibilidad del análogo intraoral para el diseño y la producción de modelos prototipados.

La tabla también incluye números con una leyenda completa que encontrarás al final de la página.

Haz clic aquí para consultar el PDF en tiempo real.

Para mantenerte siempre actualizado, crea un acceso directo directamente en tu escritorio.

CONNESSIONI IMPLANTARI (IMPLANT CONNECTIONS)					
CASA IMPLANTARE (IMPLANT MANUFACTURER)	NOME IMPIANTO (IMPLANT CONNECTION)		Rif. ANALOGO (ANALOG REFERENCE)	DIAMETRO Ø (DIAMETER Ø)	TIPO (TYPE)
3					
3P IMPLAFAVOURITE	Cono-In		500049	3.8/4.5/5.2/6.2	INTERNAL
3P IMPLAFAVOURITE	Moncone ACW		500140	4.8	M.U.A.



SCAN BODY CODE	AVAILABLE AVAILABLE IN GENERIC NOT AVAILABLE								A N A L O G	INFO
	NO ROT				ROT					
	METAL	ZIRCONIA PMMA	V4	LINK-IN	METAL	ZIRCONIA PMMA	V4	LINK-IN		
A191	AVAILABLE				AVAILABLE				✓	1
A439					AVAILABLE IN GENERIC	AVAILABLE IN GENERIC				

Configurador

El **CONFIGURADOR** te ayudará a encontrar el código correcto que debes seleccionar en tu software durante la fase de diseño CAD.

Procedimiento para utilizar el **CONFIGURADOR**, haz clic aquí.

PROYECTOS POR APROBAR 3

* PEDIDOS LISTOS PARA ENVIAR 8

COMUNICACIONES 7

NA
LOADING

PEDIR PRODUCCIÓN CAD CAM

SPEEDY
SHOP

PEDIR COMPONENTES PROTÉSICOS

SURGERY

DIVISIÓN MÉDICA

GROW
UP

NEW ANCORVIS EDUCATION

CONFIGURADOR NEW ANCORVIS

PEDIR COMPONENTES PERSONALIZADOS

DESCARGAR BIBLIOTECAS CAD

SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN PROTÉSICA

*Con "pedidos listos para enviar" se hace referencia a los pedidos con envío previsto en la fecha corriente. El estado del pedido "listo para enviar" se confirma cuando el semiacabado solicitado ha superado la fase de pruebas. Se recomienda controlar la actualización del ESTADO del pedido después de las 20-30 horas.

CONFIGURADOR NEW ANCORVIS

Tipo de implante	BIOMET 3i
Conexión	ESTERNA
Diámetro	
	EXTERNAL HEX (Ø IMPLANTO 3.25) - MMILA 3.4
	EXTERNAL HEX - ILAW5 5.0
Software CAD-CAM	EXOCAD
Pilar de Escaneado	SCAN ABUTMENT AQ
Tipología	ELEMENTO UNITARIO ATORNILLADO
Material	METAL
Código librería	NewAncorvis - AQ Direct Biomet 3i® External NO ROT
Código librería MBASE	NA - MBase Tech Biomet 3i Ext 4.1
Código Pilar de Escaneado	A014
3d Análogo Digital	✓
	DESCARGA PDF

Selecciona aquí el software CAD para obtener el código de bibliotecas correcto.


Códigos de Biblioteca para usar en el software CAD

Nota: Al hacer clic en **"Imprimir PDF"** encontrarás un resumen completo de todos los procesos realizables, componentes y el correspondiente código de producto disponible para la instalación seleccionada.

Archivo PDF

Visualiza todos los resultados de **búsqueda de la librería** por tipo de implante y ordena los componentes.

Mantén abierta la sesión de la Tienda Online en otra ventana y haz clic en el código del componente; accederás directamente a la página de compra, completando el pedido rápidamente.

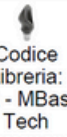NewAncorvis - CONNESSIONI IMPLANTARI (IMPLANT CONNECTIONS) - 10/01/2025											
CASA IMPLANTARE (IMPLANT MANUFACTURER)		NOME IMPIANTO (IMPLANT CONNECTION)			Rif. ANALOGO (ANALOG REFERENCE)		DIAMETRO Ø (DIAMETER Ø)		TIPO (TYPE)		INFO
STRAUMANN		Bone Level Tapered - Regular CrossFit			025.4101		4.1/4.8		INTERNAL		2-6
SCAN BODY CODE	NO ROT				ROT				3D MODEL ANALOG	PREMILLED TITANIO	Mbase Tech
	METAL	ZIRCONIA PMMA	V4	LINK-IN	METAL	ZIRCONIA PMMA	V4	LINK-IN			
 A048	Codice Libreria: NewAncorvis - AQ Direct Straumann® NO ROT	 Codice Libreria: NewAncorvis - AQ Direct Straumann® NO ROT CBL41	 Codice Libreria: NewAncorvis AQ TiBase Straumann® Bone Level V4 Foro dritto: V4BL41H1 V4BL41H2 V4BL41H3 Foro inclinato: V4BL41H1I V4BL41H2I V4BL41H3I		Codice Libreria: NewAncorvis - AQ Direct Straumann® ROT	 Codice Libreria: NewAncorvis - AQ Direct Straumann® ROT CTBL41R	 Codice Libreria: NewAncorvis AQ TiBase Straumann® Bone Level V4 Foro dritto: V4BL41RH1 V4BL41RH2 V4BL41RH3 Foro inclinato: V4BL41RH1I V4BL41RH2I V4BL41RH3I		 ANBL41-IO	 PRBL41	 Codice Libreria: NA - MBase Tech Straumann Bone Level RC CoCR MBSNBL41C Ti MBSNBL41T
LEGENDA											
 SCAN BODY AQ Localizzatore di impianto (scan abutment)	 PREMILLED Moncone fresabile tipo premilled	 Tecnica avvitata: Protesi avvitata diretta in metallo su impianto	 SLY SYSTEM Tecnica avvitata: Protesi avvitata diretta in zirconia su impianto	 V4 Tecnica ad incollaggio: Protesi avvitata cementata su Ti Base	 LINK-IN SYSTEM Tecnica ad incollaggio: Protesi avvitata cementata su Ti Base	 3D MODEL ANALOG Analoghi per modelli prototipati da stampa 3d					
INFO											
TECNICA AVVITATA SCREW-RETAINED TECHNIQUE		NO ROT: Singola Single Abutment ROT: Ponti avvitati Implant Bridge ZIRCONIA/PMMA: SLY SYSTEM				1. La connessione singola prevede il FILETTO ESTRATTIVO Single abutment also available with extractive thread. 2. La connessione singola non realizzata da premilled potrebbe essere diversa dall'originale Single abutment without premilled manufacturing may differ from the original. 3. Per la connessione non è disponibile la vite compatibile Compatible screw is not available for this connection. 4. La connessione singola è disponibile solo in Ti gr5 Single abutment only available in Ti gr5. 5. Per la connessione è disponibile anche lo scan abutment in versione SMALL For this connection it's also available the SMALL version of the scan abutment. 6. per la connessione singola è disponibile anche la produzione in MBase Tech For single abutment connection is also available the production with MBase Tech. 7. L'ingaggio del cacciavite è diverso dall'originale The screwdriver engagement is different from the original system.					
TECNICA INCOLLAGGIO CEMENTED TECHNIQUE		LINK-IN SYSTEM V4 SYSTEM									

Información de contacto



Atención al cliente

+39 320 056 61 65



export@newancorvis.eu